







# QUY TRÌNH TRA DẦU CHUẨN: *Highspeeds*

Step 1	Step 2	Step 3	Step 4	Step 5	Step 6
					
Lau sạch	Gắn đầu xịt	Tra dầu	Đẩy hơi	vệ sinh ngàmm	Gói, tiệt trùng
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lau sạch tay khoan bằng vải mềm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chọn đầu xịt phù hợp (list bên dưới)</li> <li>Gắn mũi khoan vào</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nhấn xịt và giữ trong 3 giây, đếm 1 2 3</li> <li>Đảm bảo mũi khoan xoay và đẩy cặn bắn ra đầu mũi khoan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kết nối tay khoan với nguồn hơi, có thể sử dụng tay syringe trên ghế</li> <li>Cho tay khoan chạy trong 10 giây</li> <li>Nếu cặn bắn vẫn tiếp tục ra trên đầu tay khoan, hãy tra dầu và đẩy hơi thêm vài lần nếu cần thiết.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>* 1 tuần 1 lần</b></li> <li>Nhỏ vài giọt dầu hoặc xịt một ít dầu vào ngàmm (nhớ nhấn giữ nút bấm trong khi xịt để mở toàn bộ ngàmm)</li> <li>Dùng chổi mảnh để vệ sinh lòng ngàmm.</li> </ul> <p><i>* Mẹo: Nếu bạn dùng tay chuck bấm, nhấn giữ nút bấm hoàn toàn sau đó tra mũi khoan vào rồi rút ra, lặp lại nhiều lần động tác này giúp "kéo" cặn bắn ra khỏi lòng ngàmm.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đẩy và lau sạch dầu thừa ra khỏi tay khoan, tay khoan lúc này phải hoàn toàn khô &amp; sạch</li> <li>Đóng gói và tiệt trùng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tay khoan</li> <li><i>* quan trọng không tiệt trùng với mũi khoan đang còn gắn.</i></li> <li>Không tra dầu lại lần nữa sau khi tiệt trùng</li> </ul>



**GOLDDENT**

MEDICAL EQUIPMENT JSC

TRUNG TÂM CHĂM SÓC THIẾT BỊ NHA KHOA  
137 Chu Văn An, F26, Bình Thạnh  
08 3511 5843 - www.golddent.com.vn